


## 01 | 물 준비하기

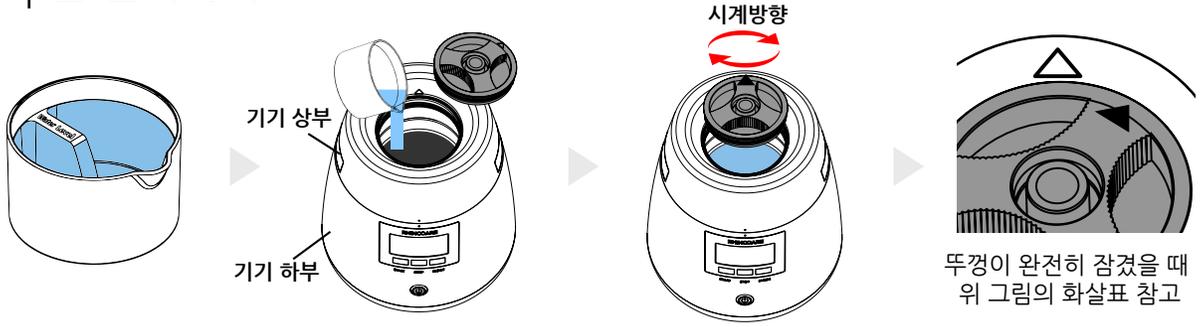


**주의사항** 절대 물 없이 사용하지 마세요!  
 물을 넣지 않고 작동하면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 가급적 생수는 사용하지 마십시오.
- 반드시 실온의 물이나 차가운 물을 사용하십시오.

- ① 정수기 물이나 정제수를 계량컵(110ml)으로 준비합니다.
- ② 기기의 상·하부가 잘 결합된 상태에서 뚜껑을 열고 준비한 물을 넣습니다.
- ③ 뚜껑을 화살표(▲) 방향에 맞춰 넣고 시계방향으로 닫습니다.
- ④ 뚜껑이 완전히 닫혔는지 확인합니다. 뚜껑을 제대로 닫지 않으면 오작동 할 수 있습니다.

## 02 | 사용 준비하기

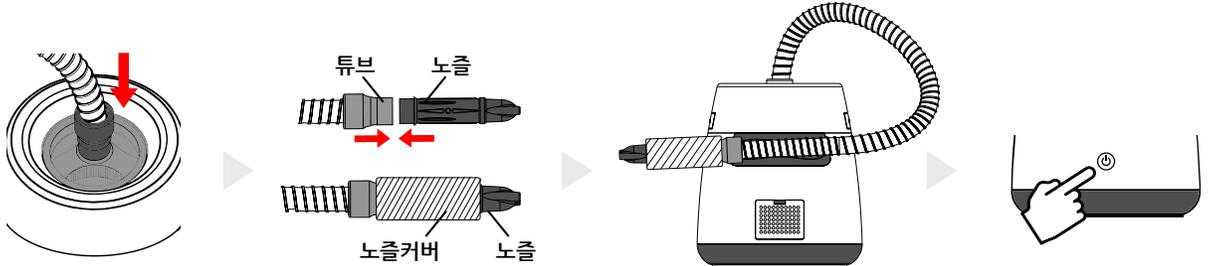

- ① 튜브의 한쪽 끝을 뚜껑에 힘껏 밀어 넣어 끝까지 연결합니다.
- ② 튜브의 반대쪽 끝을 노즐에 연결하고, 노즐에 노즐 커버를 씌웁니다.  
 뚜껑과 튜브를 잘 연결하지 않으면 오작동 할 수 있습니다.
- ③ 노즐과 튜브를 뒷면 거치대에 위치시킵니다.
- ④ 녹색 전원 버튼을 눌러서 켵니다.

## 03 | 모드 선택

**15분 모드** 주 2회사용, 3일 간격

**10분 모드** 주 3회 사용, 2일 간격


**5분 모드** 간편 사용

15분 모드 | 전원 버튼 → **START 버튼** (기본 모드)

10분 모드 | 전원 버튼 → **MODE 버튼 1회** → START 버튼

5분 모드 | 전원 버튼 → **MODE 버튼 2회** → START 버튼 (첫 사용 시 및 간편하게 사용)

## 04 | 사용 시작

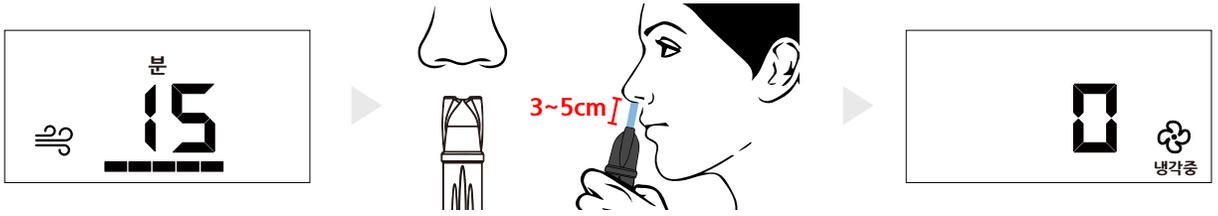


처음 사용할 때나 오랜 기간 사용하지 않다가 사용하는 경우, 물을 넣고 노즐을 거치대에 위치한 상태로 15분 모드로 1회 작동하고 물을 따라버린 후에 재사용하는 것을 권장합니다.

**⚠ 주의사항** 사용 중 노즐 끝을 피부에 접촉하지 마세요.  
사용법을 지키지 않으면 화상의 위험이 있습니다.  
처음 사용하시는 경우 5분 모드 사용을 권장합니다.

- 3~5cm 거리를 유지하고 가급적 입으로 숨을 쉽니다.
- 수증기 물이 코끝에 모여 떨어지므로 간혹 티슈로 닦아줍니다.
- 사용 중에 작동을 끝내고 싶을 때는 **STOP** 버튼을 누릅니다.

- ① 예열이 끝나면  표시가 나타나고 부저가 울립니다.
- ② 온도에 적응하기 위해 노즐을 천천히 코로 가져갑니다.
- ③ 노즐을 코 끝에서 약 3~5cm 가량 위치시켜 사용합니다.
- ④ 수증기가 콧 속 깊이 도달하도록 노즐 각도를 조절합니다.
- ⑤ 정해진 사용 시간이 끝나면 자동으로 냉각모드로  전환됩니다.
- ⑥ 냉각하는 동안 한 차례 노즐을 위로 들어올려 튜브내에 고인 물을 아래로 내린 후 노즐을 거치대에 둡니다.
- ⑦ 냉각이 끝날때까지 전원을 끄지 않습니다.

## 05 | 사용 후 정리

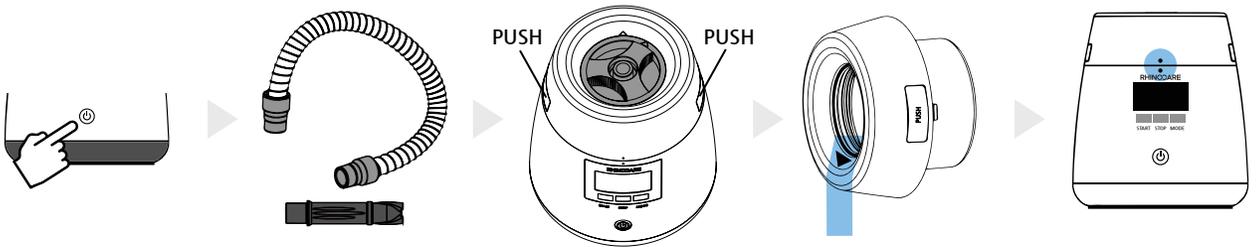





- ① 냉각이 끝나면 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다.
- ② 노즐과 튜브를 분리합니다.
- ③ 양쪽 옆면의 **PUSH** 버튼을 눌러 상단부와 하단부를 분리합니다.
- ④ 뚜껑을 반시계 방향으로 열고 화살표(▲) 방향으로 남은 물을 버립니다.  
깨끗한 마른 천이나 주방 티슈로 컨테이너 내부 물기를 닦아 냅니다.
- ⑤ 뚜껑을 다시 잠그고, 지시점(●)을 따라 상단부와 하단부를 재결합하여 보관합니다.

## 자가 진단

- 제품의 고장은 아니지만 사소한 원인으로 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 다음의 사항에 대해 확인하신다면 다양한 문제를 해결할 수 있습니다.
- 뒷면의 <오류 메시지>를 통해서도 확인할 수 있으며, 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

증상	확인해주세요	해결 방법
전원 플러그를 꽂아도 전원 버튼에 녹색 불이 들어오지 않아요.	<b>전기가 적절하게 공급되고 있나요?</b> 녹색 불이 켜지지 않으면 전기가 공급되지 않는다는 뜻입니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원 플러그를 다른 콘센트에 꽂아 보거나, 확실히 꽂아주십시오.</li> <li>• 220V 외에는 사용하지 마십시오.</li> <li>• 정전이 아닌지 확인하십시오.</li> </ul>
화면에 아무것도 표시되지 않고, 시작 버튼을 눌러도 작동하지 않아요.	<b>전원 버튼을 눌렀나요?</b> 녹색 전원 버튼을 누르면 버튼의 녹색 불이 꺼지고 화면이 켜집니다. 버튼의 불이 꺼진 것이 기기가 켜진 상태입니다.	전원 플러그를 확실히 꽂아주시고, 전원 버튼을 눌러주십시오.
시작 버튼을 누른 후, 바로 기기가 멈추고 냉각 모드로 넘어갔어요.	<b>작동 전 물을 넣었나요?</b> 냉각 모드가 끝나면 전원을 끄고 상단 뚜껑을 열어 컨테이너 안에 물이 있는지 확인해 주십시오.	물이 없을 경우, 20분 후 실온의 새 물을 넣어 다시 시작하십시오.
	<b>기기 본체의 상·하부가 제대로 결합 되어 있나요?</b>	기기 상부를 꼭 눌러서 밀착하여 결합하여 주십시오.
화면에 물부족 아이콘이 나타났지만 정상적으로 작동해요.	<b>사용 방법의 안내에 따라 110ml의 물을 넣었나요?</b> 물을 정량보다 적게 넣었을 경우, 물 부족 알람이 뜨지만 정상적으로 작동합니다.	물부족으로 인해, 선택한 시간보다 빨리 작동이 끝나게 됩니다. 계속해서 사용을 원하는 경우, 남은 물을 버리고 20분 후 실온의 새 물을 넣어 다시 시작하십시오.
아직 작동 시간이 남았는데 기기가 냉각 모드로 넘어갔어요.	<b>사용방법의 안내에 따라 110ml의 물을 넣었나요?</b> 물을 정량보다 적게 넣으면, 기기가 사용 중에 물이 부족한 것을 자동으로 감지하여 작동을 중지하고 냉각 모드로 들어갑니다.	계속해서 사용을 원하는 경우, 남은 물을 버리고 20분 후 실온의 새 물을 넣어 다시 시작하십시오.

## 오류 메시지

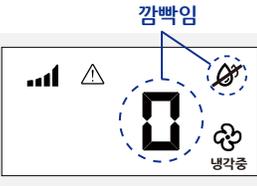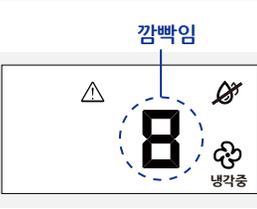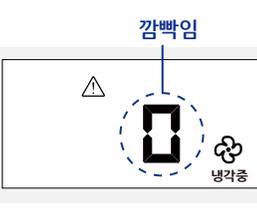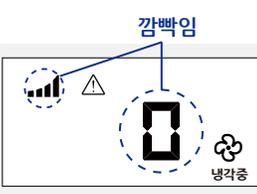 <p>감빡임</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 물 없이 작동</li> <li>• 물 교체없이 연속 사용</li> <li>• 온수를 넣음</li> </ul>	<p>기기를 끄고 뚜껑을 열어 물을 넣었는지 확인하고, 물이 없으면 20분 후 새롭게 실온의 물을 넣어 다시 시작하세요.</p>
 <p>감빡임</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 물을 적게 넣음</li> <li>• 물 교체없이 연속 사용</li> <li>• 미온수를 넣음</li> </ul>	<p>기기를 끄고 뚜껑을 열어 정량의 물을 넣었는지 확인하고, 20분 후 정량의 실온의 물을 넣어 다시 시작하세요.</p>
 <p>감빡임</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 물을 적게 넣음</li> <li>• 뚜껑이나 노즐을 잘못 결합함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 정량의 물을 넣었는지 확인</li> <li>• 뚜껑과 노즐을 올바르게 결합 했는지 확인</li> <li>• 20분 후 실온의 물을 넣어 다시 시작</li> </ul>
 <p>감빡임</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 노즐이나 공기 흡입구 막힘</li> </ul>	<p>노즐이나 공기 흡입구, 에어 필터가 막히지 않았는지 확인 후, 막힘을 제거합니다.</p>
 <p>감빡임</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기기의 상하부를 잘못 결합함</li> </ul>	<p>상하부가 분리되지 않았는지 확인하고, 상부를 꼭 눌러 확실히 결합합니다.</p>
 <p>감빡임</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 물 없이 작동</li> </ul>	<p>기기를 끄고 뚜껑을 열어 물을 넣었는지 확인하고, 물이 없으면 20분 후 새롭게 실온의 물을 넣어 다시 시작하세요.</p>

## 주의 사항

- 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참고하세요.
- **물 없이 사용하지 마세요.** 반드시 물을 넣어 사용하세요.
- 뚜껑과 튜브, 노즐을 제대로 연결하지 않으면 오작동 할 수 있습니다.
- 연속해서 사용할 경우, 반드시 남은 물을 버리고 20분 후 실온의 물을 넣어 새로 시작하세요.
- 사용 중 노즐 끝을 피부에 접촉하지 마세요.
- 안내된 사용방법을 벗어나는 경우 **화상의 위험**이 있습니다.
- 만 12세 이하의 어린이, 노약자, 장애가 있으신 분이 사용하는 경우 **반드시 보호자가 각별한 주의를 기울여 함께 사용하세요.**
- 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

본 제품은 의료기기입니다.

**RHINOCARE**

제조사 | (주)라이노케어코리아